


Mailahanskan käyttö

PELIOHJEET: PARALYMPIAKOMITEA JA MALIKE 1/2020



1. Mailahanskan osat:


- sormiosa,
- maila
- hanska.

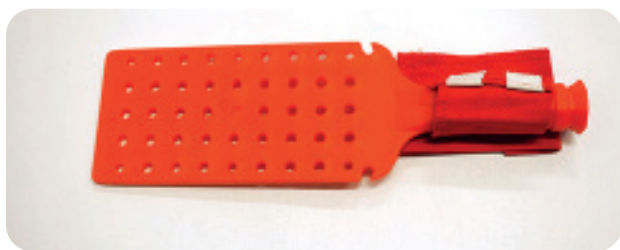

2. Kiinnitä hanskan sormiosa tarranauhakiinnityksellä mailaan.



3. Pujota sormet sormiosaan. Jo pelkkä sormiosa saattaa antaa riittävän tuen mailan pitämiseen.

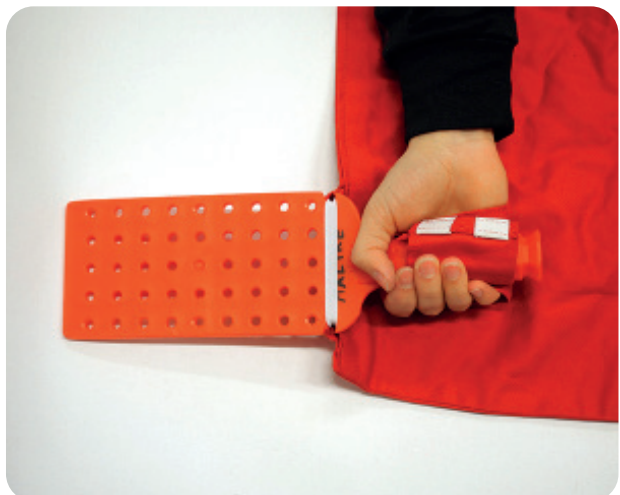

4. Pujota hanskan kuminauha mailan sivussa oleviin koloihin.

5. Näin mailan kädensija asettuu kämmeneen ja mailahanska on kämmenselän puolella.




6. Aseta sormet mailan kädensijan ympärille.
Käännä hanska tukevasti käden ympärille.



7. Kiinnitä tarranauhat.

Voit käyttää tartuntaotteen tukemiseen myös elastista sidettä.

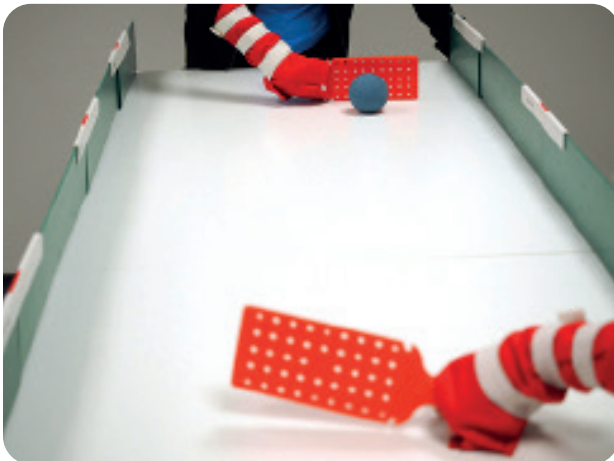

VÄLINEIDEN HANKINTA

Tevella Oy www.tevella.fi