


## KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Wheelblades-pyörätuolisukset

Wheelblades-sukset kiinnitetään pyörätuolin tukipyöriin, jolloin ne ohjautuvat tukipyörien mukana ja keventävät kulkua lumella. Sukset on tarkoitettu päivittäiseen liikkumiseen manuaalipyörätuoleilla.

Sukset soveltuvat parhaiten käytettäväksi kävelyyn tarkoitetuilla, tampatuilla väylillä.

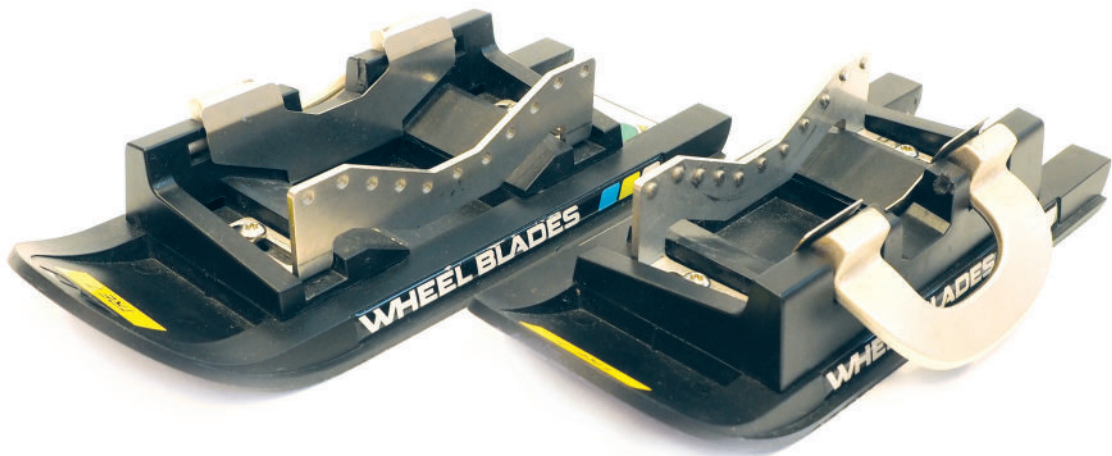

Wheelblades-pyörätuolisuksista on saatavilla kaksi kokoa, S ja XL. Pienempi koko on tarkoitettu pyörätuolin tukipyöriin. Suurempaa XL-mallia voidaan käyttää kaikissa rattaissa, joissa on sopiva rengaskoko.

### **S** Pyörätuolin tukirengaan mitat:

Leveys	20 - 60 mm
--------	------------

Halkaisija	80 - 200 mm
------------	-------------

### **XL** Rattaiden renkaan mitat:

Leveys	20 - 70 mm
--------	------------

Halkaisija	150 - 300 mm
------------	--------------


Ensimmäistä kertaa asennettaessa pyörätuolisukset on säädettävä tukipyörän leveyden mukaan kohdalleen. Ensisäädön jälkeen suksien asennus tapahtuu nopeasti ilman työkaluja. Wheelbladesuksien kiinnityksen säätöön tarvitset torx-avaimen (T25).

Kiinnityslevyettä säädettäessä suksi kannattaa lisäksi keskittää silmämääräisesti.

## Käyttöönotto


### Säädöt

Päiset säätämään sekä kiristyslevyettä, että keskitämään sukset avaamalla kuvaan merkityt kaksi ruuvia (T25).

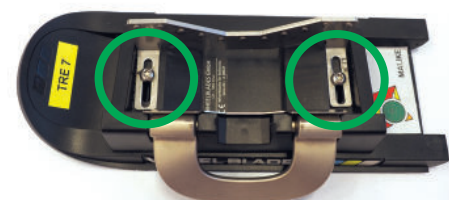


### Vasteen säätö

Sopiva leveys vasteelle on helpointa asettaa nostamalla tukipyörä paikalleen suksen kiinnikkeeseen ja painamalla vaste kevyesti tukipyörää vasten. Älä kiristä ruuveja vielä. Toisen suksen säätämisessä voit käyttää avuksi sisempää mitta-asteikkoa (Kuva 1). Mitta-asteikosta voit tarkastaa myös, että vaste on suorassa.

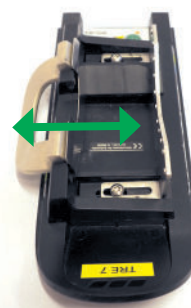

### Kiinnityskohdan keskitys

Suksen runko on kaksiosainen. Rungon osaa liikuttamalla sivuttaissuunnassa säädetään tukipyörä keskelle suksea. Silmämääräinen säätö riittää. Voit keskittää toisen suksen käyttämällä ulompaa mitta-asteikkoa (Kuva 2).

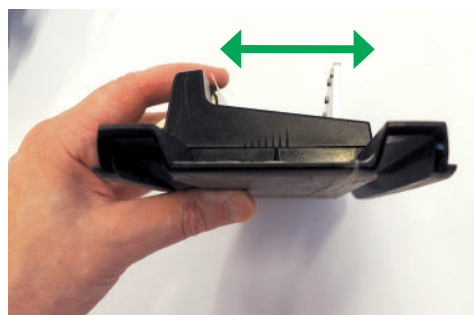


### Säätöruuvien kiristys

Kiristä säätöruuvit ja tarkasta, että tukipyörä on suunnilleen keskellä suksea. Tarkasta lisäksi, että vaste on suorassa suksen runkoon nähden.

! Älä kiristä säätöruuveja liikaa.



Kuva 1

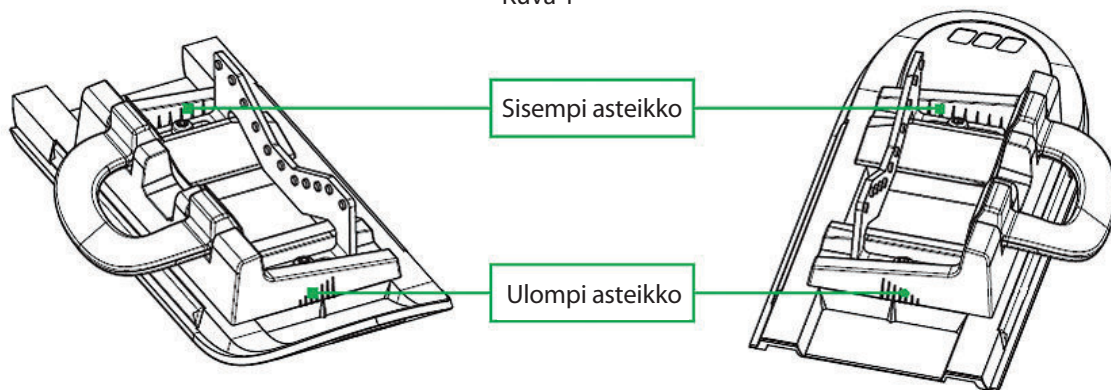

### Pyörätuolisuksien asennus

Ensisäädön jälkeen asennus on helppoa. Aseta sukset pyörätuolin eteen kuten kuvassa, lukot auki. Lukot kannattaa asettaa ulospäin. Nosta pyörätuolin tukirenkaat suksen keskellä olevaan uraan, käännä lukot kiinni ja tarkista, että kiinnitys on tukeva. Varo sormia lukkoja kiinnittäessäsi.

